




Ambu® Perfit ACE™ & Mini Perfit ACE™ Einstellen & Anlegen

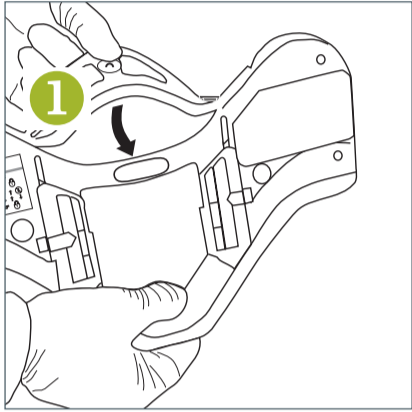


1 Klappen Sie das Kinnstück von der Innenseite nach außen. Hierdurch erhält die Perfit ACE™ ihre funktionsbereite Form.

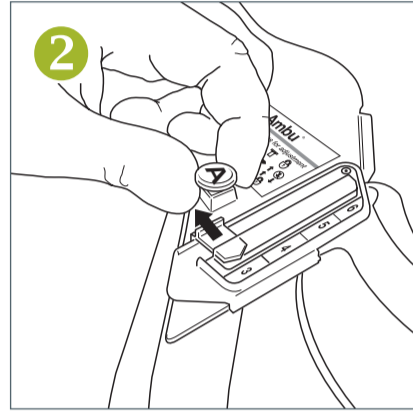


2 Vor dem Anlegen ziehen Sie die Verriegelungsknöpfe heraus und schieben die Rasterpfeile nach außen.

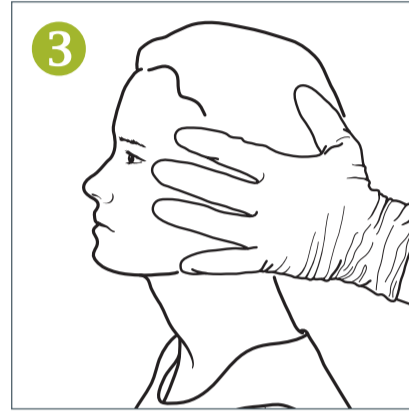


3 Stabilisieren Sie den Kopf und den Nacken des Patienten. Halten Sie den Kopf mit gespreizten Fingern in neutraler Position. Je nach Befinden des Patienten sollten geltende Richtlinien für HWS-Verletzungen beachtet werden.

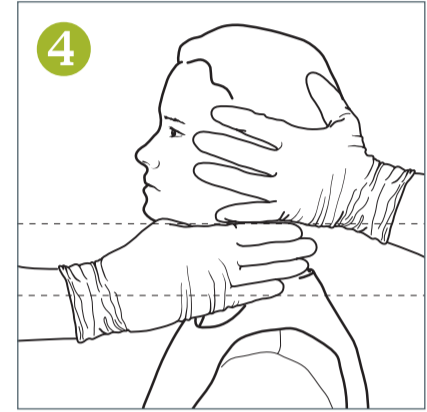


4 Messen Sie mit Hilfe Ihrer Finger den Abstand zwischen Kinn und Schulteransatz.

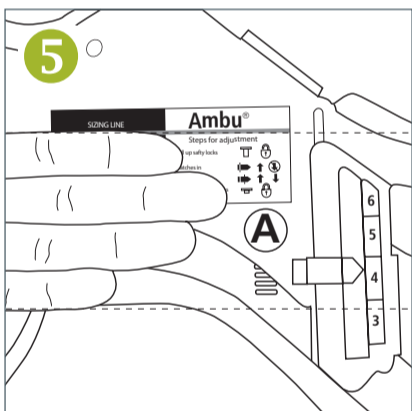


5 Stellen Sie die Perfit ACE™ entsprechend des abgemessenen Fingerabstandes ein. Legen Sie dafür den Zeigefinger der rechten Hand an die schwarze Markierungslinie und ziehen das Kinnstück soweit nach unten bis der Schaumstoff mit dem kleinen Finger abschließt.

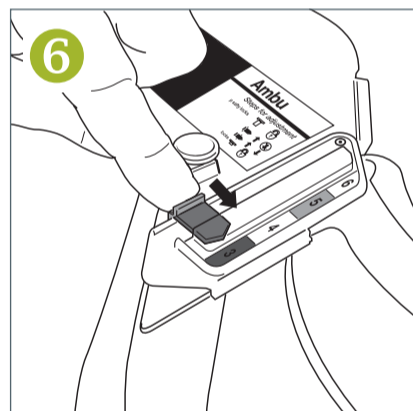


6 Schieben Sie die Rasterpfeile für eine individuelle Größenanpassung nach innen.

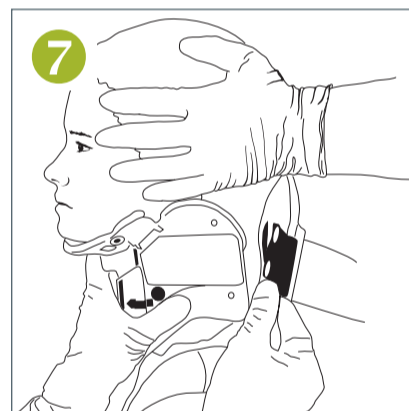

7 Legen Sie nun die Perfit ACE™ vorsichtig am Patienten an. Der Kopf muss währenddessen sicher in der neutralen Position gehalten werden.

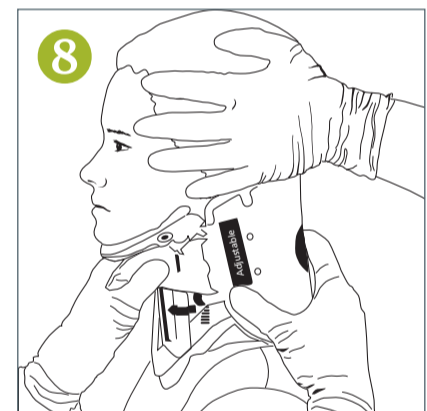

8 Passen Sie die Perfit ACE™ durch Verschieben des Kinnstücks individuell am Patienten an. Anhand der Feinraasterung lässt sich die Größe der Perfit ACE™ optimal an die jeweilige Halsanatomie anpassen.

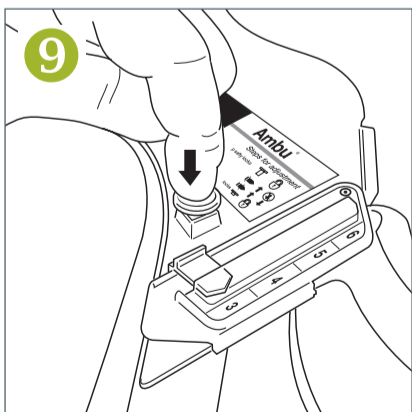

9 Wenn Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Verriegelungsknöpfe nach unten. Nur so kann die Perfit ACE™ abschließend am Patienten gesichert werden.



Ambu® Perfit ACE™

Einstellbare Größen:
3 (neckless), 4 (short),
5 (regular), 6 (tall)
16-fache Feinraasterung



Ambu® Mini Perfit ACE™

Einstellbare Größen:
1 (infant), 2 (paediatric),
3a (small adults)
12-fache Feinraasterung

Synmedic AG

Gerhardstrasse 1 CH-8003 Zürich
Tel: +41 (0)44 454 60 40
Fax: +41 (0)44 454 60 41
info@synmedic.ch www.synmedic.ch

Ambu

IMMOBILISATION